



## Akute Wunde

Wundart	Produktempfehlung
Spalthautentnahmestelle am Tag der Entnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zetuvit® Plus Silicone Border<sup>3</sup></li> </ul>
Spalthautentnahmestelle in der Granulations- und Epithelisierungsphase <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroTac®</li> <li>•HydroTac® comfort</li> <li>•HydroTac® Border Multisite</li> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•HydroTac® transparent comfort</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>
Spalthauttransplantat in der Granulations- und Epithelisierungsphase <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroTac®</li> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•HydroTac® transparent comfort</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>
Primäre Wundnaht mit nicht infizierter Teildehiszenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroTac®</li> <li>•HydroTac® comfort</li> <li>•HydroTac® Border Multisite</li> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•HydroTac® transparent comfort</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>
Verbrennungen bis Grad 2a	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•HydroTac® transparent comfort</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Ag<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>
Schürfwunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroClean®</li> <li>•HydroTac®</li> <li>•HydroTac® comfort</li> <li>•HydroTac® Border Multisite</li> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•HydroTac® transparent comfort</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Ag<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>
Risswunde z.B. Pergamenthaut	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HydroTac®</li> <li>•HydroTac® transparent</li> <li>•Atrauman®<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Ag<sup>1</sup></li> <li>•Atrauman® Silicone<sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> einlagig verwenden + Sekundärverband notwendig, z.B. Zetuvit® Plus<sup>3</sup>

<sup>2</sup> mit geringer bis mäßiger Exsudation

<sup>3</sup> in der Klinik als RespoSorb® Super und RespoSorb® Silicone Border verfügbar



Der ideale Partner zur Unterstützung der bequemen und schmerzfreien Reinigung und Wundversorgung!

Hier erfahren Sie mehr ...  
<https://plhn.de/hcs>



## Fixierung

normale Haut	empfindliche Haut	Extremitäten	Gelenke	Finger und Zehen	Sakralbereich
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hydrofilm®</li> <li>•Omnifix® elastic</li> <li>•Omniplast®</li> <li>•Peha-haft®</li> <li>•Peha-last®</li> <li>•Peha-lastotel®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coverflex® fast</li> <li>•Omnipor®</li> <li>•Omnisilk®</li> <li>•Peha-crepp®</li> <li>•Peha-haft®</li> <li>•Peha-lastotel®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coverflex® fast</li> <li>•Peha-haft®</li> <li>•Peha-last®</li> <li>•Peha-lastotel®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coverflex® fast</li> <li>•Omnifix® elastic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peha-haft®</li> <li>•Stülpa® Fertigverband</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hydrofilm®</li> <li>•Omnifix® elastic</li> </ul>

**Achtung:** Peha-haft® und Coverflex® fast ist mit Vorsicht bei Patienten mit Durchblutungsstörungen einzusetzen. Nicht verwenden bei bekannter PAVK. Fixierung nur nach ärztlicher Anordnung und KADI Kontrolle (0,9-1,3).

## NÜTZLICHE LINKS

**HARTMANN: Hilft. Pflegt. Schützt.**  
 Weitere Informationen erhalten Sie hier ...



<https://plhn.de/hhw>

**Wundversorgung** – hier erfahren Sie mehr zu unseren Produkten ...



<https://plhn.de/hhpw>

**Sprechstundenbedarf** – erfahren Sie mehr über unser Sprechstundenbedarf-Sortiment ...



<https://plhn.de/SSB-u>

**Seminare** – mehr Info's zur Weiterbildung in der Wundbehandlung erfahren Sie hier ...



<https://plhn.de/sw>