



## Dekubitus

Druckgeschwür infolge lokaler Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes durch Druck, Scherkräfte, Reibung oder einer Kombination dieser Faktoren.

	Reinigungsphase			Granulationsphase	Epithelisierungsphase
	Nekrose	Infektion	Exsudierende Wunde / Fibrinbelag		
<b>Oberflächliche Wunden</b>					
	Exsudat		Exsudat		Intakte Wundumgebung
	•HydroClean® •Hydrosorb® Gel		•HydroClean® •Hydrosorb® Gel <sup>3</sup> •Atrauman® Ag <sup>1,2</sup>		•HydroClean® •Hydrocoll® •Hydrocoll® sacral •Hydrocoll® concave •HydroTac® •HydroTac® comfort •HydroTac® Border Multisite •HydroTac® transparent •HydroTac® transparent comfort •Atrauman® <sup>1</sup> •Atrauman® Silicone <sup>1</sup>
	Exsudat		Exsudat		Geschädigte Haut
	•HydroClean® <sup>2</sup> •Sorbalgon® <sup>2</sup> •Atrauman® Ag <sup>1,2</sup>		•HydroClean® •Sorbalgon®		•HydroTac® •HydroTac® transparent •Atrauman® <sup>1</sup> •Atrauman® Silicone <sup>1</sup>
	Exsudat  - <b>TIPP</b>		Exsudat  - <b>TIPP</b>		Exsudat  - <b>TIPP</b>
•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>	
Exsudat		Exsudat			
•Zetuvit® Plus <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus <sup>4,5</sup>			
<b>Tiefe oder zerklüftete Wunden</b>	Exsudat		Exsudat		
	•HydroClean® cavity •Hydrosorb® Gel		•HydroClean® •HydroClean® cavity		•HydroClean® •HydroClean® cavity •Hydrosorb® Gel <sup>3</sup> •Sorbalgon®/Sorbalgon® T
	Exsudat		Exsudat		
	•Sorbalgon®/Sorbalgon® T <sup>2</sup> •Atrauman® Ag <sup>1,2</sup>		•Sorbalgon®/Sorbalgon® T		
	Exsudat  - <b>TIPP</b>		Exsudat  - <b>TIPP</b>		Exsudat  - <b>TIPP</b>
	•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus Silicone <sup>4,5</sup> •Zetuvit® Plus Silicone Border <sup>4,5</sup>
Exsudat		Exsudat			
•Zetuvit® Plus <sup>4,5</sup>		•Zetuvit® Plus <sup>4,5</sup>			

<sup>1</sup> einlagig verwenden + Sekundärverband notwendig, z.B. Zetuvit® Plus<sup>4</sup>  
<sup>2</sup> bei klinisch infizierten Wunden nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden  
<sup>3</sup> nur bei geringem Exsudatlevel verwenden  
<sup>4</sup> in der Klinik als RespoSorb® Super, RespoSorb® Silicone und RespoSorb® Silicone Border verfügbar  
<sup>5</sup> Primärverband optional mit z.B. HydroClean®

wenig Exsudat mäßig Exsudat viel Exsudat



Der ideale Partner zur Unterstützung der bequemen und schmerzfreien Reinigung und Wundversorgung!

**Hier erfahren Sie mehr ...**  
<https://plhn.de/hcs>



## Fixierung

normale Haut	empfindliche Haut	Extremitäten	Sakralbereich
•Hydrofilm® •Hydrofilm® roll •Omnifix® elastic •Omniplast® •Peha-haft® •Peha-lastotel® •Stülpa®-fix	•Omnipor® •Omnisilk® •Peha-crepp® •Peha-haft® •Peha-last® •Peha-lastotel® •Stülpa®	•Omnifix® elastic •Peha-haft® •Peha-last® •Peha-lastotel® •Stülpa® •Stülpa®-fix	•Omnifix® elastic

**Achtung:** Peha-haft® und Coverflex® fast ist mit Vorsicht bei Patienten mit Durchblutungsstörungen einzusetzen.  
 Nicht verwenden bei bekannter PAVK. Fixierung nur nach ärztlicher Anordnung und KADI Kontrolle (0,9-1,3).

## Klassifikation Dekubitus nach EPUAP\*

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel (2019). Prevention and Treatment of pressure ulcers. Quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel.

	Kategorie 1	Hautrötung bei intakter Epidermis
	Kategorie 2	oberflächliche Hautläsion, Blase, Hautabschürfung
	Kategorie 3	tiefe Schädigung der Haut, Nekrose des subkutanen Gewebes bis zur Faszie
	Kategorie 4	Schädigung aller Hautschichten, Gewebsnekrose, Schädigung von Muskeln, Knochen
	Kategorie uneinstufbar / nicht klassifizierbar – unbekannte Tiefe	tatsächliche Tiefe ist im Wundbett verdeckt
	Kategorie vermutete tiefe Gewebeschädigung – unbekannte Tiefe	Schmerzhaftigkeit des Gewebes kann vorausgehen

\*European Pressure Ulcer Classification System, European Pressure Ulcer Advisory Panel

## NÜTZLICHE LINKS

**HARTMANN: Hilft. Pflegt. Schützt.**  
 Weitere Informationen erhalten Sie hier ...



<https://plhn.de/hhw>

**Wundversorgung** – hier erfahren Sie mehr über unsere Produkte ...



<https://plhn.de/hhpw>

**Sprechstundenbedarf** – erfahren Sie mehr über unser Sprechstundenbedarf-Sortiment ...



<https://plhn.de/SSB-u>

**Seminare** – mehr Info's zur Weiterbildung in der Wundbehandlung erfahren Sie hier ...



<https://plhn.de/sw>