



Diabetisches Fußsyndrom

Ein diabetisches Fußsyndrom liegt vor, wenn folgende Bedingungen vorhanden sind:
 • Diabetes mellitus und
 • akutes oder chronisches Fußulkus (Malum perforans pedes) sowie

• diabetische Polyneuropathie vom peripher symmetrischen Typ und/oder
 • periphere arterielle Verschlusskrankheit.

	Reinigungsphase			Granulationsphase	Epithelisierungsphase	
	Nekrose	Infektion	Exsudierende Wunde / Fibrinbelag			
Oberflächliche Wunden						
	Exsudat		Exsudat	Intakte Wundumgebung	Intakte Wundumgebung	
	• HydroClean® • Hydrosorb® Gel		• HydroClean® ² • Hydrosorb® Gel ³ • Atrauman® Ag ^{1,2}	• HydroClean® • Hydrosorb® Gel ³ • Atrauman® Silicone ¹	• HydroClean® • Hydrocoll® • HydroTac® • HydroTac® comfort • HydroTac® Border Multisite • HydroTac® transparent • HydroTac® transparent comfort • Atrauman® ¹ • Atrauman® Silicone ¹	• Hydrocoll® thin • HydroTac® • HydroTac® comfort • HydroTac® Border Multisite • HydroTac® transparent comfort • Atrauman® ¹ • Atrauman® Silicone ¹
	Exsudat		Exsudat	Geschädigte Haut	Geschädigte Haut	
	• HydroClean® ² • Sorbalgon® ² • Atrauman® Ag ^{1,2}		• HydroClean® • Sorbalgon®	• HydroClean® • HydroTac® • HydroTac® transparent • Atrauman® ¹ • Atrauman® Silicone ¹	• HydroTac® • HydroTac® transparent • Atrauman® ¹ • Atrauman® Silicone ¹	
Exsudat - TIPP		Exsudat - TIPP	Exsudat - TIPP			
• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}		• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}	• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}			
Exsudat TIPP		Exsudat TIPP				
• Zetuvit® Plus ^{4,5}		• Zetuvit® Plus ^{4,5}				
Tiefe oder zerklüftete Wunden						
	Exsudat		Exsudat			
	• HydroClean® • HydroClean® cavity • Hydrosorb® Gel		• HydroClean® ² • HydroClean® cavity ² • Hydrosorb® Gel ³	• HydroClean® • HydroClean® cavity	• HydroClean® • HydroClean® cavity • Hydrosorb® Gel ³	
	Exsudat		Exsudat			
	• Sorbalgon®/Sorbalgon® T ² • Atrauman® Ag ^{1,2}		• Sorbalgon®/Sorbalgon® T			
Exsudat - TIPP		Exsudat - TIPP	Exsudat - TIPP			
• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}		• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}	• Zetuvit® Plus Silicone ^{4,5} • Zetuvit® Plus Silicone Border ^{4,5}			
Exsudat TIPP		Exsudat TIPP				
• Zetuvit® Plus ^{4,5}		• Zetuvit® Plus ^{4,5}				

¹ einlagig verwenden + Sekundärverband notwendig, z.B. Zetuvit® Plus⁴
² bei klinisch infizierten Wunden nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden
³ nur bei geringem Exsudatlevel verwenden
⁴ in der Klinik als RespoSorb® Super, RespoSorb® Silicone und RespoSorb® Silicone Border verfügbar
⁵ Primärverband optional mit z.B. HydroClean®

wenig Exsudat mäßig Exsudat viel Exsudat

Der ideale Partner zur Unterstützung der bequemen und schmerzfreien Reinigung und Wundversorgung!

Hier erfahren Sie mehr ...
<https://plhn.de/hcs>

Fixierung

normale Haut	empfindliche Haut	Gelenke	Zehen
<ul style="list-style-type: none"> • Hydrofilm® • Omnifix® elastic • Omniplast® • Peha-haft® • Peha®-lastotel® • Stülpa® 	<ul style="list-style-type: none"> • Coverflex® fast • Omnipor® • Omnisilk® • Peha-crepp® • Peha-haft® • Peha-last® • Peha®-lastotel® • Stülpa® 	<ul style="list-style-type: none"> • Coverflex® fast • Omnifix® elastic • Peha-haft® • Stülpa® 	<ul style="list-style-type: none"> • Stülpa® Fertigverband

Achtung: Peha-haft® und Coverflex® fast ist mit Vorsicht bei Patienten mit Durchblutungsstörungen einzusetzen. Nicht verwenden bei bekannter PAVK. Fixierung nur nach ärztlicher Anordnung und KADI Kontrolle (0,9-1,3).

Klassifikation des DFS nach Wagner/Armstrong

Hodeck & Bahrmann (2014). Pflegewissen Diabetes. Praxistipps für die Betreuung älterer Diabetes-Patienten. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

	A	B	C	D
0	 Prä- oder postulzerative Läsion	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie
1	 Oberflächliche Wunde	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie
2	 Wunde bis zur Ebene von Kapsel/Sehne	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie
3	 Wunde bis zur Ebene von Knochen/Gelenk	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie
4	 Nekrose von Fußteilen	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie
5	 Nekrose des gesamten Fußes	 mit Infektion	 mit Ischämie	 mit Infektion und Ischämie

Abbildungen: Gunnar Riepe (ICW e.V.)

NÜTZLICHE LINKS

<p>HARTMANN: Hilft. Pflegt. Schützt. Weitere Informationen erhalten Sie hier ...</p> <p>https://plhn.de/hhw</p>	<p>Wundversorgung – hier erfahren Sie mehr zu unseren Produkten ...</p> <p>https://plhn.de/hhpw</p>	<p>Sprechstundenbedarf – erfahren Sie mehr über unser Sprechstundenbedarf-Sortiment ...</p> <p>https://plhn.de/SSB-u</p>	<p>Seminare – mehr Info's zur Weiterbildung in der Wundbehandlung erfahren Sie hier ...</p> <p>https://plhn.de/sw</p>
---	---	---	---